

Rollaattori Flex

KÄYTTÖOPAS



BLIMO
APUVÄLINEET

Tuotteen yleiskuva



Rollaattorin osaluettelo:

1. Selkänoja

2. Kangaskori

3. Etupyörän lukitsin

4. Etupyörä

5. Takapyörän lukitsin

6. Takapyörä

7. Korkeudn säätönappi

8. Kokoontaitettava istuin

9. Käsijarrukahva

10. Otekahva

Pakkaus sisältää:

Rollaattori Flex

Käyttöopas

Kangaskori

Kokoamisohjeet

Vaihe 1: Etupyörien kiinnitys

Pidä punaista painiketta kuvan osoittamalla tavalla. Aseta pyörä paikoilleen.

Pyörä on oikein paikoillaan, kun se napsahtaa.



Vaihe 2: Takapyörien avaaminen

Vedä kuvan osoittamaa punaista painiketta vapauttaaksesi takajalan. Laske takajalka alas.

Paina sitten punainen painike takaisin. Kun jalka on oikeassa asennossa, painike napsahtaa paikoilleen.

Varmista, että takajalat sekä pyörät ovat kunnolla paikoillaan.



Vaihe 3: Istuimen asentaminen

Avaa rollaattori kokoontaitetusta asennosta. Paina istuimen sivuilta alas, kunnes kuulet napsahduksen.

Varmista, että isutin on kunnolla paikoillaan.



Vaihe 4: Kangaskorin kiinnittäminen

Kiinnitä kori kuvan osoittamalla tavalla.



Otekahvojen korkeuden säätö


Paina kuvan osoittamaa pientä napulaa säätääksesi otekahvat halutulle korkeudelle.

Tarkista, että molemmat kahvat ovat samalla korkeudella.



Rollaattorilla jarruttaminen

Purista molempia jarrukahvoja pysäyttääksesi rollaattorin.

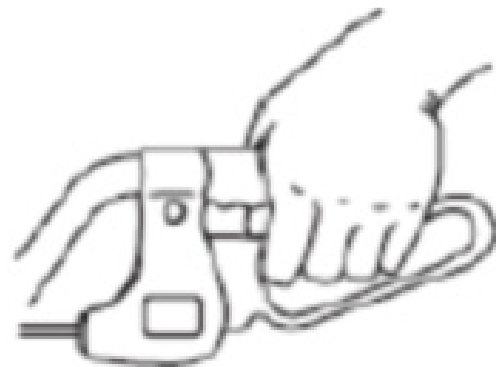

Rollaattorin parkkeeraus

Paina molemmat jarrukahvat alas, kunnes ne kliksahtavat parkkijarruiksi.

Puristakahvoja vapauttaaksesi parkkijarrun.


HUOM! Aseta parkkijarrut päälle aina ennen rollaattorille istumista!



Rollaattorin kokoontaitto

Vedä istuimessa olevaa kahvaa taittaaksesi rollaattorin kokoon.

Voit myös toistaa vaiheet 1-3 takaperin varastointia varten.

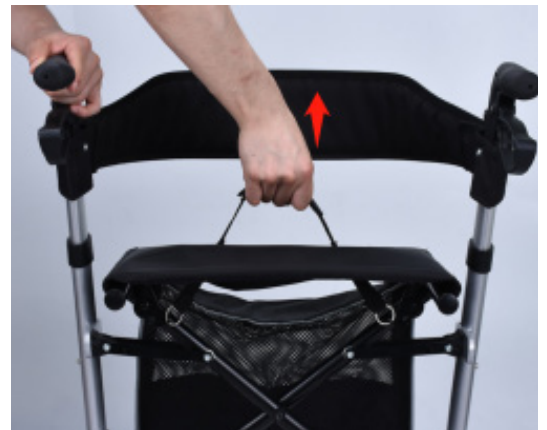

YHTEYSTIEDOT

Blimo

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141Norrtälje

SWEDEN

Puh: 09 4245 2099

E-mail: info@blimo.fi

Org. 556908-9385

Y-tunnus: 2834405-9

BLIMO
APUVÄLINEET